



GODKJENNES FOR REFUSJON

URO-TAINER® POLIHEXANIDE 0,02 %

Uro-Tainer® Polihexanide 0,02 % godkjennes for refusjon under hjemmelspunkt 502 fra 1. juli 2022.

Uro-Tainer Polihexanide 0,02 % vil bli oppført på produkt- og prislisen fra 1. juli 2022. Produktet vil bli oppført i artikkelgruppen «skyllevæsker til urologisk bruk ved gjentatte kateterrelaterte infeksjoner». Førstegangsforskrivning skal gjøres av relevant spesialist.

Produktnavn	Art.nr	Varenr.	Str.	Ant. i pakk
Uro-Tainer® Polihexanide 0,02 %	FB99965	962723	100 ml	10

Uro-Tainer® Polihexanid 0,02 % er et produkt i B. Brauns serie for stell av urinkateter. Hvert produkt er utviklet for å løse/forebygge problemer som oppstår ved langtidsbruk av urinkateter. Ved for eksempel krystallisering og kalkdannelse på kateter på grunn av høy PH i urinen, vil Uro-Tainer® Suby G (sitronsyre) være en riktig løsning, mens ved bakteriell kolonisering (biofilm) vil Uro-Tainer® Polihexanid 0,02 % være spesielt utviklet for akkurat dette formålet.

Mange brukere av urinkateter opplever at kateteret går tett eller må skiftes som følge av kateterassosierte problemer. Bakteriekolonisering og dannelse av biofilm på kateterets inn- og utside danner et optimalt miljø for bakteriene og beskytter dem samtidig mot lokal og systemisk behandling av infeksjoner.

Skyll med Uro-Tainer® Polihexanid 0,02 % kan redusere mengde biofilm og forebygge kolonisering på innliggende kateter, og kan benyttes inntil x2 i døgnet ved behov. Anbefalt skyllefrekvens vil være individuell, og variere utfra problemets grad og pasientens behov. Den er godt egnet for langtids bruk.

En reduksjon/forebygging av biofilmdannelse på kateteret kan ha flere positive effekter:

- Redusert forekomst av kateterassosierte urinveisinfeksjoner.
- Forlenget brukstid på kateter.
- Færre uplanlagte kateterskift grunnet infeksjon og/eller tett kateter.
- Eliminering av sjenerende lukt.
- Redusert misfarging av urin.
- Mindre slimdannelse og generelt mindre ubehag for kateterbruker.

Skann QR-koden for å lese mer om problemet med biofilm på våre hjemmesider



Kontaktinformasjon Innlandet:

Norengros Dahle Medical AS
Rosenlundveien 4, 2619 Lillehammer
61 24 80 00
dahle.medical@norengros.no
www.dahlemedical.no

